



**Регулируемая опора под  
спину Ortonica HR3000**  
Инструкция по эксплуатации



Для безопасной эксплуатации компания Ortonica рекомендует ознакомиться с настоящей инструкцией

Рама регулируемой опоры под спину Ortonica HR3000 (далее по тексту - опора) выполнена из прочной стали, покрыта полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Материал из которого выполнена спинка дает необходимую упругость и обладает умеренной жесткостью. Мягкий подголовник обеспечивает поддержку шейному отделу.

## **1. Назначение**

Опора предназначена для дополнительной поддержки спины. Она устанавливается на кровать и обеспечивает необходимый угол наклона спины.

## **2. Меры безопасности**

- При регулировке положения опоры рекомендуем воспользоваться сторонней помощью;
- Во избежание получения травм рук соблюдайте осторожность при регулировке угла наклона опоры;
- Не переносите вес тела на одну из сторон рамы - опора может опрокинуться.
- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку.
- Не допускайте контакта опоры с электрическими приборами и проводами.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем.
- Перед использованием опоры убедитесь в отсутствии нарушения целостности тканевого покрытия. Не используйте покрытие с признаками дефектов.
- Не ставьте на опору посторонние предметы.

## **3. Эксплуатация**

1. Разложите раму.
2. Внимательно осмотрите опору, убедитесь в фиксации всех резьбовых соединений;
3. Установите опору под спину на кровать;
4. При необходимости отрегулируйте угол наклона.

## 4. Хранение и уход

Рекомендуем хранить опору в сухом, чистом месте. Конструкция компактно складывается, поэтому не занимает много места. Очищать опору мягкой тканью с использованием мыльных моющих средств.

Рекомендации по уходу за тканью:



Стирка не выше  $t^{\circ}= 40$



Ручная и машинная стирка



Глажка до  $110^{\circ}$

## 5. Комплектация

- Регулируемая опора под спину Ortonica HR3000 -1 шт;
- Инструкция по эксплуатации - 1шт.

## 6. Технические характеристики

Ширина, см	64
Высота, см	68
Длина, см	55
Угол наклона	40-80°
Допустимая нагрузка, кг	100
Количество положений регулировки	'
Спинка, см	58x57
Подголовник, см	33x19
Вес, кг	3,15

## Гарантийное обслуживание

**Производитель:** ООО «Ортоника» Адрес : 105064, Россия , Москва, ул. Земляной Вал, д. 2, кв.14.

**Адрес производства:** 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11

Гарантия не распространяется в случае, если изделие вышло из строя по вине покупателя:

- Превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- Сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы.
- Умышленное повреждение и поломка изделия.
- Использование материалов, деталей и узлов не предусмотренных производителем. Применение неоригинальных запчастей.
- Использование изделия не по назначению
- Отсутствие необходимого ухода за изделием
- Нарушение целостности тканевого покрытия в ходе эксплуатации

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

### Гарантийный талон

Наименование изделия:

Регулируемая опора под спину **Ortonica HR3000**

1. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи \_\_\_\_\_

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед"

**Контактный телефон:** 8 (800) 707-44-52

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11