

Инструкция по эксплуатации

Профессиональный
аппарат для массажа

ZAM-01



Доступные режимы:

- «Массаж»
- «Лимфодренаж»
- «Прессотерапия»



Компания сертифицирована по стандартам
ISO 9001, 13485, 14001

Разработан для салонов красоты. Не является изделием медицинской техники.

Поздравляем вас с покупкой профессионального
массажного аппарата WelbuTech Seven-Liner Zam-01
Инструкция по эксплуатации обеспечивает безопасное
и удобное использование.



Содержание

Необходимо знать перед использованием.....	4
Главные особенности массажного аппарата ZAM-01.....	5
Перед началом работы.....	6
Стандартная комплектация аппарата Seven-Liner ZAM-01.....	7
Размеры «L» и «XL» манжет для ног.....	8
Дополнительные опции к аппаратам Seven-Liner.....	8
Правила использования манжет.....	11
Комбинации нескольких манжет.....	13
Seven-Liner ZAM-01 – описание прибора.....	18
Подготовка к использованию.....	19
Сравнение режимов массажа.....	20
Очередность нагнетания давления в манжетах.....	21
Регулировка давления.....	21
После использования.....	21
Уход и техническое обслуживание.....	22
Возможные неисправности и методы их устранения.....	23
Технические характеристики прибора.....	24
Условия гарантии.....	25
Гарантийный талон.....	26

Необходимо знать перед использованием

Все инструкции и предупреждения, приведенные в данном руководстве, должны быть строго соблюдены во время эксплуатации аппарата. Храните руководство в удобном и легкодоступном месте для использования в будущем. Продавец или изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, происходящие из-за несоблюдения инструкции.

Рекомендации к применению.

Прибор предназначен для работы в салонах красоты с целью снятия усталости, коррекции фигуры и прочих косметологических целей.

Инструкции по безопасности.

- Используйте этот аппарат только по назначению, как описано в данном руководстве;
- Не используйте другие аппараты или электрическое одеяло совместно с этим устройством;
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и не помещайте его под устройство в процессе эксплуатации (невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током);
- Не ставьте тяжелые предметы на прибор, не роняйте прибор с высоты и не подвергайте ударам;
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены;
- Не погружайте прибор в воду;
- Храните прибор в сухом, не пыльном месте;
- Не используйте прибор в ванной или местах с повышенной влажностью и температурой;
- Во избежание перегрева компрессора не используйте прибор за одно включение более 60 минут (каждые 60 минут необходимо делать перерыв не менее 15 минут). Пример: 15 минут массажа, 15 минут лимфодренажа, 30 минут прессотерапии, 15 минут перерыва;
- Не рекомендуется использовать прибор более 3 раз в день одному человеку. Любое чрезмерное или длительное использование может вызвать появление синяков и/или болезненных ощущений;
- Прибор может не функционировать при низких температурах и должен находиться в помещении с комнатной температурой в течение минимум 2-х часов перед началом любых действий;
- Проводите процедуры и храните устройство вдали от детей и домашних животных;
- Этот прибор предназначен для использования только людьми;

- Не используйте прибор в помещениях с легковоспламеняющимися и/или взрывоопасными жидкостями, газами;
- Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Несоблюдение этого требования может привести к пожару поражению электрическим током и аннулированию гарантии;
- Во время использования массажного аппарата мышцы массируемой части тела должны быть расслаблены. Несоблюдение этого требования может привести к травме или повреждению прибора;
- Не раскрывайте (не растягивайте молнию) и не снимайте манжеты во время процедур, обязательно отключайте прибор перед этим;
- Не перегибайте и не разрезайте воздушные шланги;
- Не тяните вилку из розетки за шнур;
- Не беритесь за шнур питания или вилку мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током;
- Прибор всегда должен оставаться выключенным, если не используется;
- Рекомендуется применение специальной одноразовой одежды, разработанной для прессомассажа, также можно использовать корректирующие кремы;
- Вы можете услышать шумы (звук двигателя или выходящий через клапан избыточный воздух) при работе прибора в тихом помещении. Это звуки нормальной работы прибора, не являются признаком неисправности;
- При работе аппарата с уровнем давления выше среднего может появиться легкая вибрация корпуса. Не является признаком неисправности.

Главные особенности массажного аппарата ZAM-01

- Повышенная надежность аппарата и манжет, специально для коммерческого использования;
- Четыре (4) камеры в каждой манжете;
- Эксклюзивная серия «Black Label» – практичный стильный дизайн, панель управления и манжеты черного цвета;
- Сверхпрочный, четырехслойный, инновационный, запатентованный материал манжет – «Diamond»;
- Антибактериальное покрытие манжет;
- Три (3) режима работы: «Массаж», «Лимфодренаж», «Прессотерапия»;
- Плавная регулировка давления;
- Давление от 50 до 250 (+/- 30) мм ртутного столба;
- Сенсорные кнопки управления;
- Таймер на 15 / 20 / 30 минут;
- Воздушные шланги впаяны в камеры манжет.

Перед началом работы

1) Распаковка.

- Достаньте прибор из коробки и выполните проверку;
- Тщательно осмотрите прибор на предмет механических повреждений;
- Убедитесь в наличии всей комплектации согласно указанной в разделе «Стандартная комплектация аппарата Seven-Liner ZAM-01» на стр. 7.
- Если аппарат приобретен с полной комплектацией, то помимо коробки со стандартной комплектацией вам будут предоставлены дополнительно еще 2 коробки (с манжетой для руки и манжетой-поясом).

2) Обратите внимание перед использованием.

- Перед использованием этого прибора, необходимо прочитать все инструкции и предупреждения. Аппарат необходимо применять только по назначению, как описано в данном руководстве;
- Регулируемое давление воздуха имеет диапазон 50-250 (± 30) мм рт. ст.
- Не используйте манжеты, если они повреждены. Свяжитесь с сервисным центром для устранения повреждений;
- Начинайте пользоваться устройством с 15-минутной процедуры и на самом низком уровне рабочего давления;
- Постепенно повышайте давление и время процедуры по мере необходимости;
- В начале работы аппарата, выбранное давление будет набираться постепенно, в течение 2-3 циклов накачки всех камер;
- Снимите все украшения, такие как ожерелья, браслеты, кольца и часы перед использованием устройства. Также избегайте использования одежды с пуговицами, молниями и ремнями. Освободите карманы;
- Во время использования прибора рекомендуется принять горизонтальное положение тела и расслабиться.

3) Подготовка к работе.

- Убедитесь, что ваш источник питания соответствует характеристикам питания массажного аппарата: 100–240 В, 50/60 Гц;
- Вставьте шнур питания в розетку.

Стандартная комплектация аппарата Seven-Liner ZAM-01

Аппарат



Манжеты для ног (L / XL)



Пакет



Инструкция



Разветвитель



Массажные стельки



Воздушный шланг




Дополнительные опции (приобретаются отдельно)

Манжета для талии (пояс) (входит в полную комплектацию)	Манжета для руки (входит в полную комплектацию)	Расширители манжет для ног размера L (6/12 см)	Расширители манжет для ног размера XL (8/16 см)	Расширитель манжеты для руки (5/10 см)	Расширитель манжеты для талии (50 см)

Размеры «L» и «XL» манжет для ног

Области массажа: ступня – голень – икра – бедро
Выбирайте желаемый размер манжет при покупке прибора.

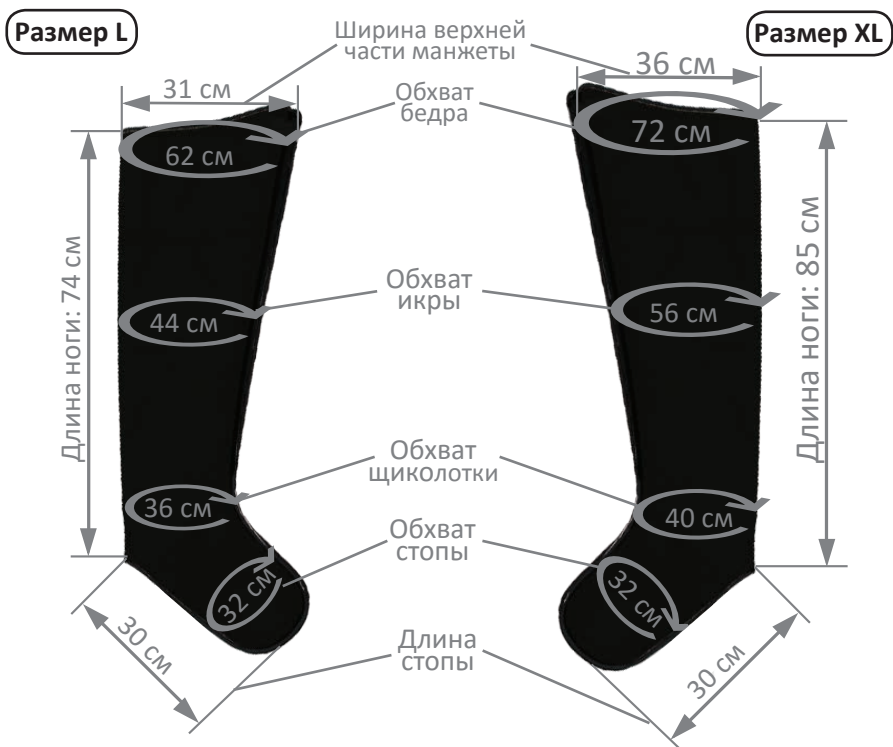

Дополнительные опции к аппаратам Seven-Liner

Дополнительные опции не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно. Подробнее ознакомиться с вариантами расширения комплектации можно на сайте welbu.ru. Для покупки дополнительных опций свяжитесь с вашим продавцом.

1) Расширители манжет.

Если размер ног, рук или талии хотя бы по одному из параметров равен или превышает размеры манжет, указанные на этой странице, то необходимо дополнительно приобрести расширители, для увеличения размера манжет и получения более комфортного массажа.

Расширитель для манжет ног размера L: 6/12 см, 2 шт. в комплекте



Предназначен для расширения манжет ног размера L с возможностью выбора размера увеличения: на 6 или на 12 см. Регулировка размера производится с помощью двух застежек-молний, расположенных на разном уровне.

Расширитель для манжет ног размера XL: 8/16 см, 2 шт. в комплекте



Предназначен для расширения манжет ног размера XL с возможностью выбора размера увеличения: на 8 или на 16 см. Регулировка размера производится с помощью двух застежек-молний, расположенных на разном уровне.

Расширитель для манжеты руки: 5/10 см, 1 шт. в комплекте



Предназначен для расширения манжеты руки с возможностью выбора размера увеличения: на 5 или на 10 см. Регулировка размера производится с помощью двух застежек-молний, расположенных на разном уровне.

2) Манжета для массажа руки (входит в «Полную комплектацию»).

Области массажа: пальцы – кисть – предплечье – локоть – плечо.

Опциональная манжета для руки с четырьмя камерами, поставляется в комплекте со специальным воздушным шлангом.

Внимание: Не используйте одновременно две манжеты для рук при проведении процедур на одном человеке!



3) Манжета для талии (пояс) (входит в «Полную комплектацию»)


Области массажа: верх живота – центральная часть спины – поясница – центральная часть живота – бока – низ живота – крестец – ягодицы.

Если сместить манжету ниже, то область массажа перенесется на бедра и ягодицы.

Поставляется в комплекте с отдельным воздушным шлангом.

Четыре специально направленных камеры для тщательного массажа каждой зоны. Регулировка обхвата талии – от 70 до 130 см.


Размеры манжеты для талии (пояс) Seven-Liner

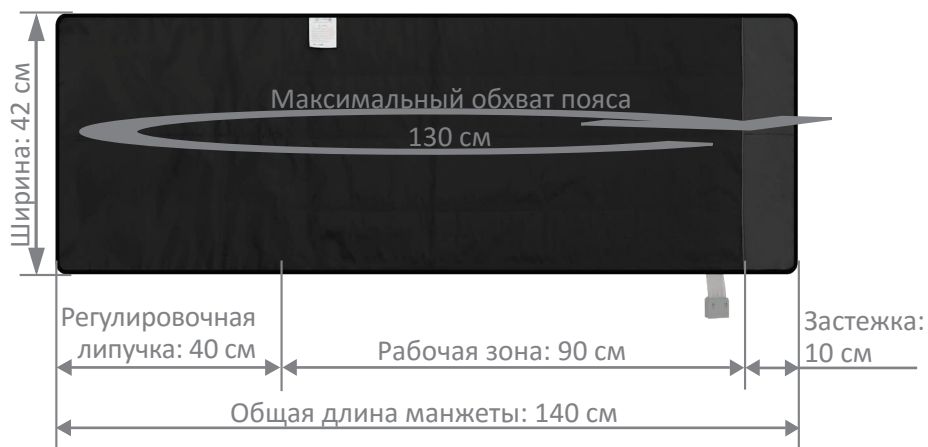

4) Расширитель манжеты для талии (пояс).

Вы можете увеличить размер манжеты для талии с помощью специального расширителя, который увеличивает возможный общий обхват талии/бедер манжетой-поясом до 170 см. Приобретается отдельно.

Размеры расширителя манжеты для талии (пояс) Seven-Liner

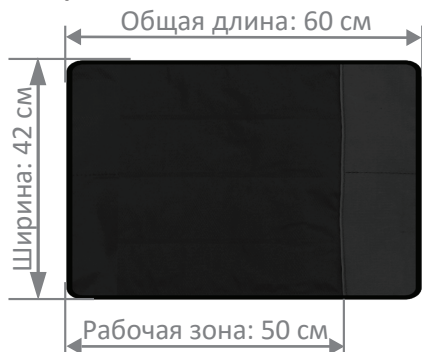

5) Разветвитель шлангов для одновременного подключения нескольких видов манжет к одному аппарату.

Не входит в комплекты «Стандартный» и «Полный», приобретается отдельно. Для одновременного подключения к одному аппарату 3-х или 4-х манжет можно использовать один или два дополнительных разветвителя. К одному аппарату разрешено подключать не более двух разветвителей, не считая стандартный раздвоенный воздуховод от манжет для ног. При использовании комплектного воздушного шланга от манжет для ног и одного разветвителя, возможно одновременное подключение 3-х манжет. При использовании комплектного воздушного шланга от манжет для ног и двух дополнительных разветвителей возможно одновременное подключение 4-х манжет. Для правильного прохождения процедуры необходимо подключение манжет ко всем каналам разветвителей. Если в текущий момент нет необходимости в подключении дополнительных манжет – отключите лишние разветвители.

Длина каждого воздуховода разветвителя составляет 50 см.




Возможные комбинации одновременно подключаемых манжет с использованием одного и двух разветвителей размещены на страницах 13 – 17.

Правила использования манжет

Внимание: производитель не рекомендует использование любых манжет без расширителей, если хотя бы один из размеров рук, ног, талии и/или бедер пользователя равен или превышает размеры, указанные в характеристиках манжет. Также компания-производитель снимает с себя любую ответственность за повреждения манжет или травмы, вызванные использованием манжет, не подходящими по размеру.

Выберите манжету для проведения процедуры (см. стр. 12–13).

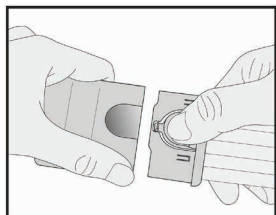

Подсоедините воздушный шланг к манжете, применив небольшое усилие. Убедитесь, что все шланги соединены до щелчка.

1) Использование манжет для ног (включены в стандартный комплект)



Перед началом процедуры необходимо снять верхнюю одежду и обувь. Рекомендуем использовать специальные одноразовые штаны. Наденьте манжеты и застегните молнию до упора, зафиксируйте липкими лямками. Размер манжет может быть увеличен с помощью расширителей (приобретаются отдельно). Для точечного массажа стоп фиксируйте массажные акупунктурные стельки с помощью резиновой ленты, вшитой в манжеты ног с внутренней стороны в области стопы. В комплект дополнительных манжет для ног не входит разветвитель, для одновременного использования 4 манжет для ног, его необходимо приобрести дополнительно.

2) Использование манжеты для руки (приобретается отдельно)



Перед началом процедуры снимите браслеты, кольца, цепочки и другие украшения. Наденьте манжету на руку, застегните застежку-молнию, при помощи липкой полоски плотно закрепите бандаж (как указано на рисунке). Убедитесь, что манжета не спадет, даже при сильном заполнении воздухом. **Внимание:** одновременное использование двух манжет для рук одному человеку не рекомендуется!

3) Использование манжеты для талии (пояс) (приобретается отдельно)



Расположите шланг сбоку, наденьте манжету вокруг талии (бедер) и плотно присоедините липучку к ворсистой части. Манжета должна охватывать нижнюю часть спины, а также верхнюю часть бедер. Особое расположение камер манжеты для талии Seven-Liner ZAM-ZAM позволяет производить массаж не только по кругу, но и отдельными зонами: верх живота и поясница, центральная часть живота (пресс), низ живота, только ягодицы, крестец.







Комбинация нескольких манжет






Внимание: следует особенно внимательно относиться к одновременному использованию комбинаций манжет, при наличии заболеваний связанных с повышенным артериальным давлением, либо в случаях резкого изменения уровня давления во время или после проведения процедуры.

Внимание: производитель оставляет за собой право вносить доработки в существующие манжеты, расширять модельную линейку и выпускать новые опции. При этом к инструкции будут приложены дополнительные листы с информацией об обновленных опциях оборудования.

1) При использовании «Полного комплекта» без приобретения дополнительного разветвителя, для процедур на 1 человека.

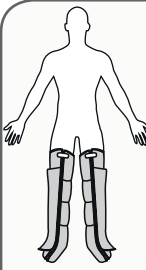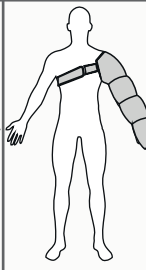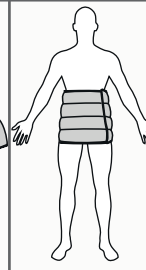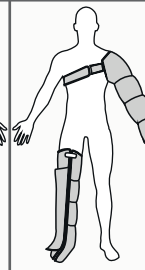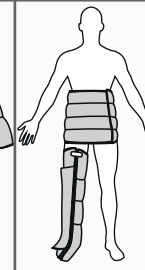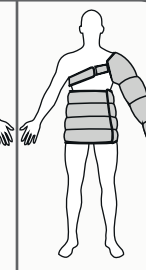					
2 манжеты для ног	1 манжета для руки	2 манжета для талии	1 манжета для ноги и 1 манжета для руки	1 манжеты для ноги и 1 манжета для талии	1 манжета для талии и 1 манжета для руки

2) При использовании «Полного комплекта» без приобретения дополнительного разветвителя, для процедур на 2-х человек.

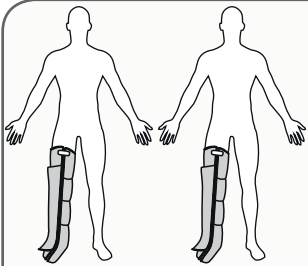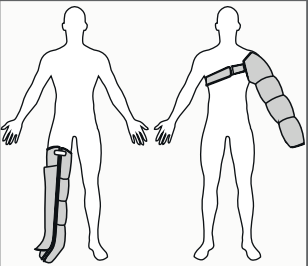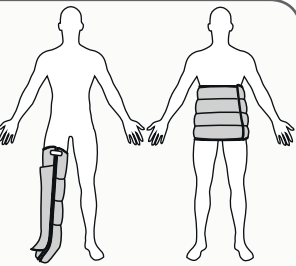
		
1-ый человек – 1 манжета для ноги + 2-ой человек – 1 манжета для ноги	1-ый человек – 1 манжета для ноги + 2-ой человек – 1 манжета для руки	1-ый человек – 1 манжета для ноги + 2-ой человек – 1 манжета для талии


1-ый человек – 1 манжета для руки + 2-ой человек – 1 манжета для талии

3) При использовании «Полного комплекта» с приобретением 1-го дополнительного разветвителя для процедур на 1-го человека.

		
2 манжеты для ног + 1 манжета для руки	2 манжеты для ног + 1 манжета для талии	1 манжета для ноги + 1 манжета для руки + 1 манжета для талии




4) При использовании «Полного комплекта» с приобретением 1-го дополнительного разветвителя для процедур на 2-х человек.

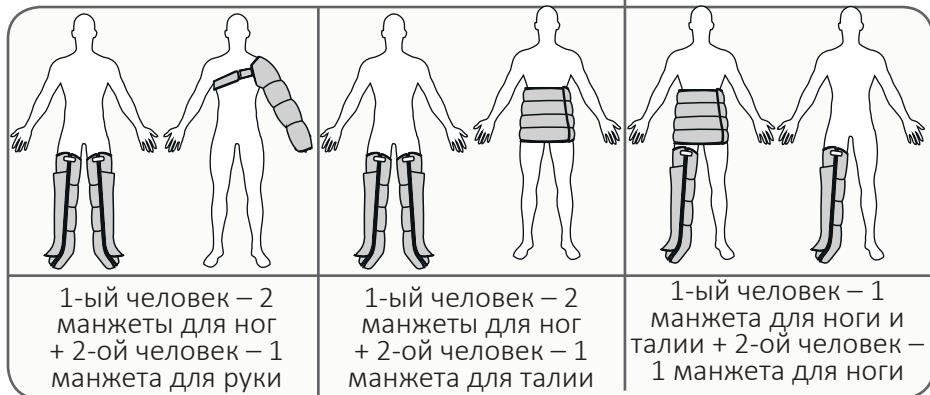


5) При использовании «Полного комплекта» с приобретением 2-х дополнительных разветвителей для процедур на 1-го человека.



б) При использовании «Полного комплекта» с приобретением 2-х дополнительных разветвителей для процедур на 2-х человек.

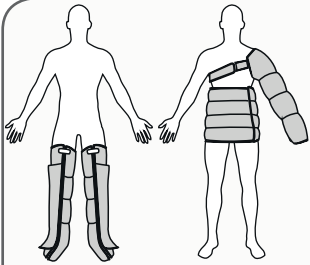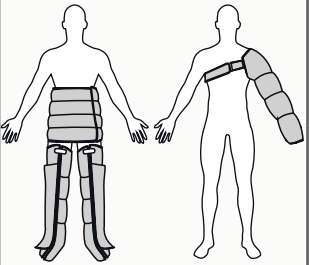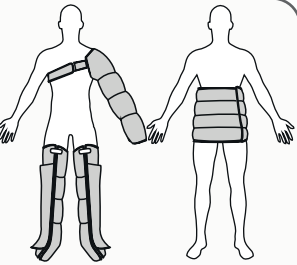		
1-ый человек – 2 манжеты для ног + 2-ой человек – 1 манжета для руки и 1 для талии	1-ый человек – 2 манжеты для ног и 1 для талии + 2-ой человек – 1 манжета для руки	1-ый человек – 2 манжеты для ног и 1 для руки + 2-ой человек – 1 манжета для талии


б) При использовании «Стандартного комплекта» с приобретением 2-х дополнительных разветвителей и 1-го дополнительного набора манжет для ног для процедур на 2-х человек одновременно.

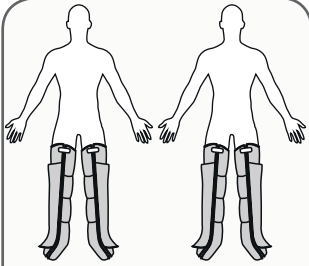
1-ый человек – 2 манжеты для ног + 2-ой человек – 2 манжеты для ног


Внимание: При использовании любых комбинаций манжет, давление, в соответствующих по порядку камерах, во всех манжетах, будет одинаковое.

Внимание: При использовании комбинаций для 2-х и более человек, рекомендуется применять исключительно модель ZAM Luxury, так как только в этом аппарате установлен точный цифровой датчик давления, определяющий время наполнения каждой камеры одновременно используемых манжет.


8) При использовании «Полного комплекта» с приобретением 2-х дополнительных разветвителей и 1 дополнительной манжеты для руки, с проведением процедур для 2-х человек.

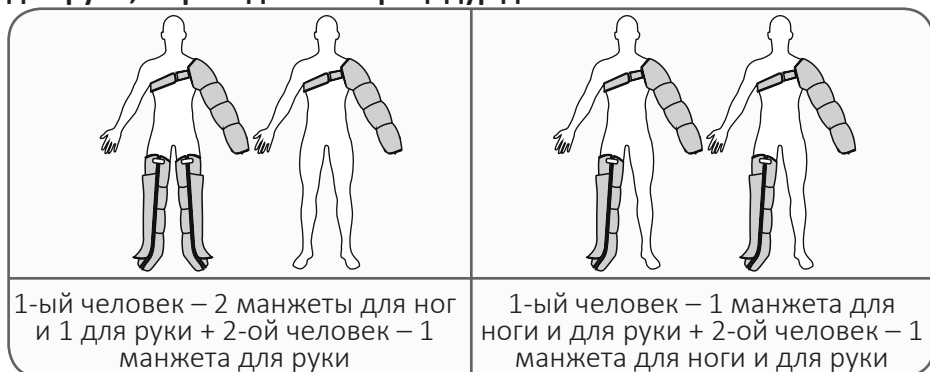

9) При использовании «Полного комплекта» с приобретением 2-х дополнительных разветвителей и 2-х дополнительных манжет для рук, с проведением процедур для 3-х человек.

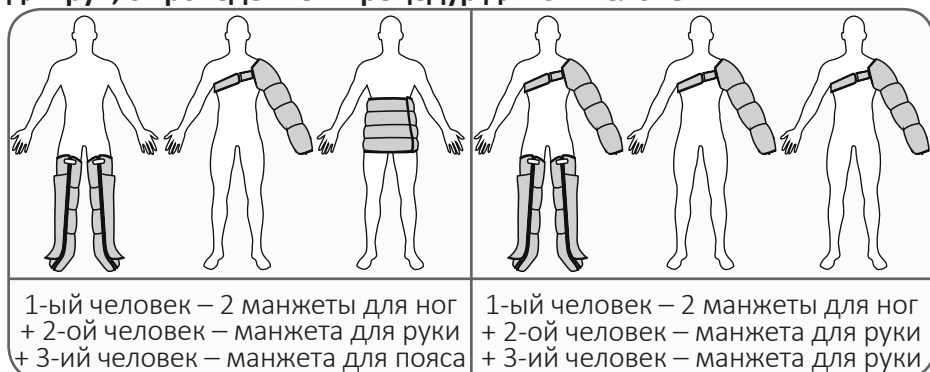

10) При использовании «Полного комплекта» с приобретением 2-х дополнительных разветвителей и 3-х дополнительных манжет для рук, с проведением процедур одновременно для 4-х человек.

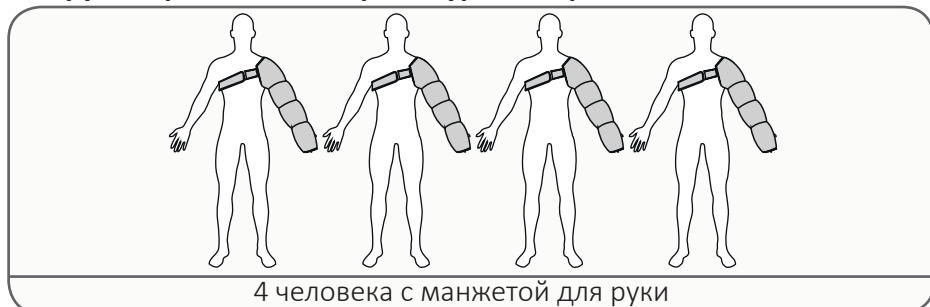

Seven-Liner ZAM-01 – описание прибора

Seven-Liner ZAM-01 – это пневмокомпрессионный массажный аппарат для массажа областей ног, рук, ягодиц и талии, с тремя режимами работы: «Массаж», «Лимфодренаж», «Прессотерапия».

Массажный эффект достигается путем накачки воздуха и создания давления в многокамерных манжетах. Кнопки на панели управления сенсорные, нажимайте их легким прикосновением пальца.

Кнопка «Выбор функции»


Выберите один из трех вариантов процедур: «массаж», «лимфодренаж», «прессотерапия».

Кнопка «Старт/Время»

Запустите аппарат одним касанием. Для выбора времени процедуры, нажмите кнопку еще раз.

Индикаторы времени

Отображают выбранный отрезок (15/20/30 минут) времени для проведения процедуры.

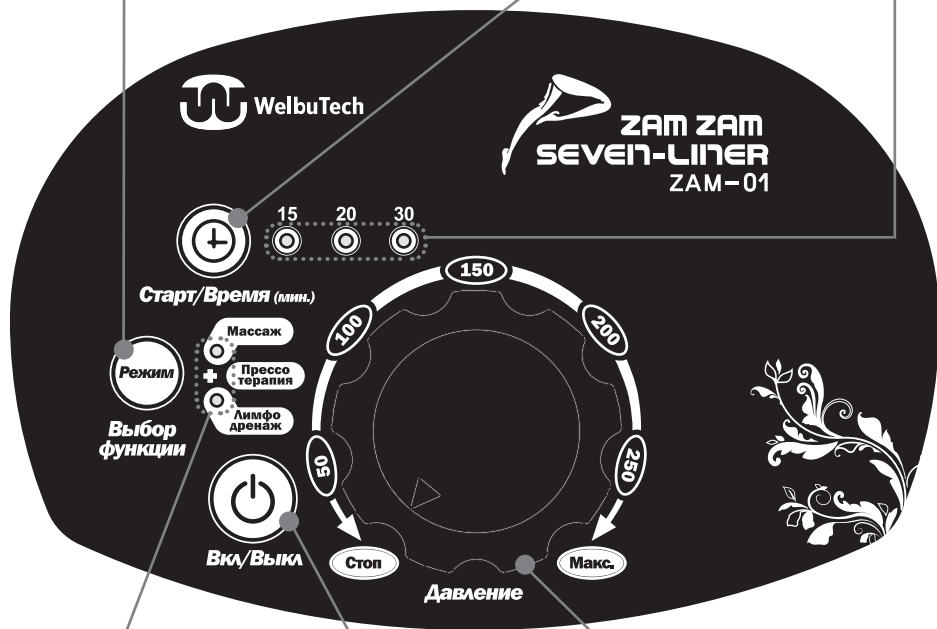

Индикаторы режима

Отображают текущий режим. При включении режима «Прессотерапия» станут активны оба индикатора «Массаж» и «Лимфодренаж».


Кнопка «Вкл/Выкл»

Включает и выключает массажный аппарат.


Регулятор давления


Выберите необходимый уровень давления. При установке регулятора в положение «Стоп» аппарат прекратит работу.

Подготовка к использованию

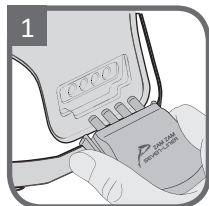


1 Вставьте штекер воздушного шланга до щелчка, чтобы датчик манжет зафиксировался боковыми лапками-фиксаторами.

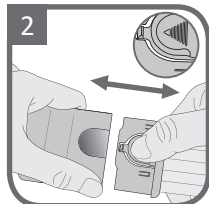


2 Зажмите кнопку  на штекере и вставьте в разъем до щелчка. При первом соединении возможно понадобится дополнительное усилие.




3 Для массажа стоп зафиксируйте стельки с помощью резинок,шитых в манжеты ног изнутри. Наденьте манжету и до упора застегните молнию.

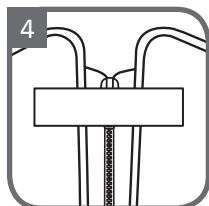

4 Зафиксируйте манжету для ног при помощи липучки.

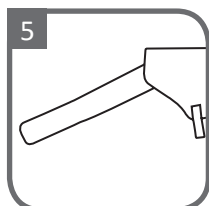


5 Чтобы надеть манжету для руки (дополнительная опция) расстегните липучку и вставьте руку в манжету.

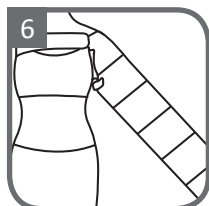


6 Застегните застежку-молнию, плотно закрепите биндаж при помощи липкой полоски. Манжета не должна спадать.



7 Наденьте манжету для талии (пояс), она должна охватывать нижнюю часть спины, а также верхнюю часть бедер.

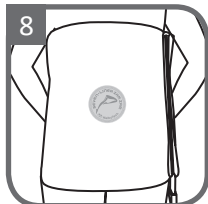

8 Расположите шланг сбоку, расправьте манжету вокруг талии (бедер).

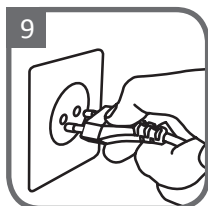

9 Убедитесь, что напряжение соответствует заявленным характеристикам аппарата, вставьте шнур питания в розетку.



Внимание!

Перед началом процедуры снимите все украшения, такие как ожерелья, цепочки, кольца, браслеты, и часы. Также избегайте использования одежды с пуговицами и молниями. Если у вас чувствительная кожа, следите, чтобы открытые участки тела не контактировали с манжетами. Рекомендуется подкладывать между манжетой и кожей тонкий отрезок ткани или мягкое полотенце. Это предотвратит раздражение кожи и сделает процедуру более приятной.

Манжеты для талии и руки не поставляются в стандартной комплектации и приобретаются отдельно. Ознакомьтесь с полным ассортиментом аксессуаров на сайте welbu.ru. Для покупки свяжитесь с вашим продавцом.



Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», для включения аппарата.



Внимание!

Изменение времени работы во время прохождения процедуры запускает отсчет времени заново, даже при возвращении к изначально установленному значению.



Нажмите «Старт/Время» для начала процедуры. Массаж по умолчанию длится 15 минут. Повторными нажатиями можно установить время работы на 20 или 30 минут. Массаж прекратится по окончании установленного времени. Если индикатор времени процедуры мигает – увеличьте уровень давления.



По умолчанию установлен режим «Прессотерапия», при этом активны оба индикатора режимов («Массаж» и «Лимфодренаж»). Для изменения режима, нажмите кнопку «Режим». Смена режима сопровождается изменением подсветки и звуковым сигналом.

Сравнение режимов массажа

Массаж	Лимфодренаж	Прессотерапия
<p> <input type="radio"/> Массаж <input checked="" type="radio"/> Прессотерапия <input type="radio"/> Лимфодренаж </p>	<p> <input type="radio"/> Массаж <input checked="" type="radio"/> Прессотерапия <input type="radio"/> Лимфодренаж </p>	<p> <input type="radio"/> Массаж <input checked="" type="radio"/> Прессотерапия <input type="radio"/> Лимфодренаж </p>

Очередность нагнетания давления в манжетах

Манжеты для ног (стандартная комплектация):

ступня → голень → колено → бедро.

Манжета для руки (дополнительная опция):

пальцы → кисть → предплечье → локоть → плечо.

Манжета для талии (пояс) (дополнительная опция):

нижняя часть живота → верхняя часть живота → нижняя часть спины → поясница → бока → ягодицы.

Манжеты для руки и для талии (пояс) входят в «Полную комплектацию», но не входят в «Стандартную комплектацию» и приобретаются отдельно.

Регулировка давления



Поверните регулятор по часовой стрелке, для увеличения давления. Против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление. Рекомендуем начинать процедуру с минимальных значений и затем в процессе выполнения процедуры плавно повышать давление. При установке регулятора в положение «Стоп» процедура прекратится.



Внимание!

Воздушные шланги не должны быть смяты или перекручены в течение всей процедуры. Если вы чувствуете, что давление в манжетах ослабло, проверьте, правильно ли был установлен штекер воздушного шланга. Проверьте уровень интенсивности давления до начала массажа. Если регулятор давления стоит в положении «Стоп», работа аппарата не начнется. Чтобы увеличить давление в манжетах, поверните регулятор по часовой стрелке. Для прекращения работы устройства переведите регулятор давления в положение «Стоп». Слишком высокий уровень давления, либо использование аппарата продолжительное время может вызвать болевые ощущения. Подберите для себя комфортный уровень давления и интервал выполнения процедуры.

После использования

Если работа компрессора остановилась и воздух начал выходить из манжет после окончания установленного времени, значит процедура окончена. После окончания работы манжеты начнут сдуваться самостоятельно, но с небольшой скоростью и не до конца.

Нажмите на кнопку выключения аппарата «Вкл/Выкл», снимите манжеты, выньте вилку из розетки.

Уход и техническое обслуживание

1) Способ хранения.

- Вытаскивайте вилку из розетки, если не используете массажер на протяжении долгого времени, храните при комнатной температуре;
- Удаляйте пыль и загрязнения по мере возникновения, храните в сухом месте;
- Если не используете массажер продолжительное время, накройте его или уберите в коробку, чтобы пыль не попадала в устройство;
- Храните массажер с отключенным от него штекером воздушного шланга для манжет;
- Не храните устройство в местах с высокой температурой и с прямым попаданием солнечных лучей;
- Прибор может функционировать не должным образом при низких температурах и должен быть помещен в комнатную температуру минимум на 2 часа перед началом использования.

2) Чистка устройства.

- Выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Отключите вилку от розетки;
- Загрязнения на пластиковых деталях протрите нейтральным моющим средством, остатки насухо вытрите мягкой тряпкой;
- Не используйте стиральную или посудомоечную машину для стирки аксессуаров и манжет;
- Не используйте воду для мытья корпуса аппарата и электрического провода.

3) Меры предосторожности.

- Не протирайте корпус устройства мокрой материей, следите за тем, чтобы вода не попадала на дополнительные детали и внутрь аппарата;
- Во время чистки деталей или самого аппарата использование растворителей или других химических веществ может привести к обесцвечиванию рисунка и надписей, а так же стать причиной появления трещин. При необходимости смочите материю небольшим количеством спирта, затем протрите поверхности салфеткой насухо;
- В случае использования других чистящих или дезинфицирующих средств соблюдайте инструкции производителя.

Возможные неисправности и методы их устранения

1) Устройство не работает.

- Отключите вилку от розетки, затем попробуйте подключить заново;
- Проверьте, правильно ли был подключен штекер воздушного шланга (воздуховод) к аппарату. Если штекер был подключен не полностью, выпал во время работы устройства или не был подключен изначально, аппарат будет работать некорректно. Вставьте штекер воздушного шланга (воздуховод) в разъем на устройстве до упора;
- Если процедура не начинается и индикатор времени мигает, а не горит непрерывно – увеличьте уровень давления;
- Если устройство не работает, несмотря на все попытки, обратитесь в авторизованный сервис-центр компании-поставщика (welbu.ru).

2) Аппарат функционирует некорректно.

- Включите и выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»;
- Если устройство хранилось или доставлено при низкой температуре окружающей среды, аппарат не будет функционировать должным образом. Оставьте устройство не менее чем на 2 часа при комнатной температуре и только после используйте;
- Проверьте, правильно ли подключены разъемы воздуховода манжет и разветвителей. Проверьте, нет ли утечки воздуха; Если по следующим причинам во время работы возникло повреждение деталей, давление будет циркулировать неправильно:
 - а) Разъем воздуховода манжеты (разветвителя) подключен к устройству неправильно – подсоедините воздуховод до щелчка;
 - б) Если воздуховод отсоединился от разъема манжеты – присоедините его, приложив необходимое усилие для фиксации;
- В случае, если все детали соединены правильно, а воздух выходит из воздуховода или манжеты, обратитесь в сервисный центр;
- Во время использования может пропасть подача тока в электросети. Это не может являться причиной поломки;
- Во время использования можно услышать звук выходящего из прибора воздуха. Это срабатывание специального предохранителя, обеспечивающего безопасность пользователя и предотвращающего поломку массажера. Не является дефектом или неправильной работой.

3) В случае повреждения вилки или шнура питания.

- Не пытайтесь ремонтировать сами, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании-поставщика (welbu.ru).

Технические характеристики прибора WelbuTech Zam-01-C

Название аппарата: Seven-Liner ZAM-01-C

Тип прибора: Массажер профессиональный пневмокомпрессионный

Номинальное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 60 Вт

Рабочее давление камер: 50–250 (+/- 30) мм рт. ст., плавная регулировка

Количество камер: 4 (четыре)

Время работы одного цикла: 15 / 20 / 30 минут

Количество режимов: 3 (три):

- Массаж;
- Лимфодренаж;
- Прессотерапия.

Габариты упаковки (Д × Ш × В): 340 × 290 × 300 (мм)

Вес аппарата без манжет: 1,5 кг

Вес аппарата с манжетами: 3,05 кг (L) / 3,25 кг (XL)

Вес аппарата с коробкой: 4,13 кг (L) / 4,33 кг (XL)

Производитель: WelbuTech Co., Ltd.

Адрес производителя: Республика Корея, Бэкбом-ро, 14, Бонгиль 677,
Сео-гу, г. Инчхон.

Сделано в Южной Корее.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажного аппарата WelbuTech Seven-Liner. На двигатель и электрические компоненты устройства, а также все виды (типы) манжет и все аксессуары к ним распространяется гарантийный срок в 1 (один) год с даты покупки. Гарантия WelbuTech распространяется только на брак производства. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая уплотнители, шланги, разъемы и фиксаторы манжет. Если во время использования прибора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией WelbuTech ремонтной организации;
4. Повреждений, не вызванных производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного или неаккуратного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений;
7. Систематического превышения рекомендованного количества циклов работы, указанного на странице 4 данного руководства.

Приобретайте официально поставляемую продукцию WelbuTech – то есть предназначенную для реализации на территории Российской Федерации и Таможенного союза и официально ввезена в страны Таможенного союза уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя. При нелегальном ввозе продукции нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры WelbuTech не осуществляют гарантийную поддержку продукции WelbuTech, нелегально ввезенной в страны Таможенного союза. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех сервис-центрах WelbuTech, контактная информация которых указана в гарантийном талоне на странице 26.

Гарантийный талон

Чтобы удостовериться, что изделие WelbuTech предназначено для продажи на территории Таможенного союза и поддерживается гарантией WelbuTech в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, проверьте его серийный номер и получите соответствующее подтверждение в авторизованном сервис-центре на сайте **welbu.ru**

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Группа компаний «Все Соки»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте welbu.ru/remont по телефону 8-800-3333-627 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@welbu.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ
И РЕМОНТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА WelbuTech В РФ:

welbu.ru/remont

Модель: WelbuTech Seven-Liner ZAM-01

Серийный номер (serial no): _____

Дата продажи: _____
(печать продавца)

Фирма-продавец: _____

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, при отсутствии печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____
(подпись покупателя)



Информацию о соответствии можно получить на сайте welbu.ru. Срок службы данного изделия равен 1 (одному) году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации и применяемым техническим стандартам.



ZAM-01



Компания WelbuTech выпускает большое количество моделей массажных аппаратов, некоторые из них обладают дополнительными удобными функциями и улучшенными характеристиками:

- Увеличенное количество камер;
- Деактивация ненужных камер;
- Скрытые шланги воздухопроводов;
- Автоматический спуск воздуха;
- Голосовое сопровождение на русском языке;
- Точная регулировка давления;
- Цифровой датчик давления;
- Автоматическая смена режима;
- Массажные антициклонные шорты;
- Ручные вибромассажеры.

Ознакомьтесь со всеми моделями и дополнительными аксессуарами можно на сайте **welbu.ru**



Компания сертифицирована по стандартам
ISO 9001,13485,14001



www.welbu.ru www.welbu.com

Производитель: Welbutech Co., Ltd.

Адрес производителя:

Республика Корея, Бэкбом-ро, 14, Бонгиль 677, Сео-гу, г. Инчхон

Сделано в Южной Корее

Официальный представитель в России

Группа компаний «Все Соки»

welbu.ru

